



Align Technology BV
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam
Niederlande

Deutschland: 0800 25 24 990
Österreich: 0800 29 22 11
Schweiz: 0800 56 38 64

Sonstige (Englisch): +31 (0)20 586 3615

www.invisalign.de

© 2017 Align Technology (BV). Alle Rechte vorbehalten. Invisalign®, ClinCheck® und SmartTrack® sowie weitere Bezeichnungen sind Marken bzw. Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder von Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen; eventuell sind diese Marken bzw. Dienstleistungsmarken in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen.

201142 Rev A



Die Zukunft der Kieferorthopädie für
Teenager ist da.





Lassen Sie Ihre jugendlichen Patienten oder Ihre Praxis nicht in der Vergangenheit zurück. Die Zukunft entwickelt sich weiter.

Die transparenten Invisalign®-Aligner haben sich als effektiv bei jugendlichen Patienten bewährt und können eine Vielzahl an Indikationen bei Teenagern behandeln.* Außerdem kann die Behandlung jetzt noch viel schneller durchgeführt werden. Jugendliche Patienten, die Sie so behandeln, wie sie es sich wünschen und wie sie es benötigen, sind glückliche Patienten. Und glückliche Patienten empfehlen eher neue Patienten.




93 %

der erfahrenen Invisalign-Kieferorthopäden sind der Meinung, dass die Invisalign-Behandlung die Zukunft der Kieferorthopädie für Teenager ist.**

*Seit 2011 wurden über 270.000 jugendliche Patienten im Alter von 19 Jahren oder jünger mit komplexen Malokklusionen mit den transparenten Alignern von Invisalign behandelt. Die Daten vom Stand 05. Dezember 2016 sind bei Align Technology archiviert.

**Daten von einer Umfrage unter 78 Kieferorthopäden, die Erfahrung bei der Behandlung von Teenagern (mindestens 40 Fälle in den letzten 8 Monaten) mit transparenten Invisalign-Alignern in Bezug auf Teenager mit permanentem Gebiss haben. Die Ärzte haben für ihren Zeitaufwand ein Honorar erhalten.

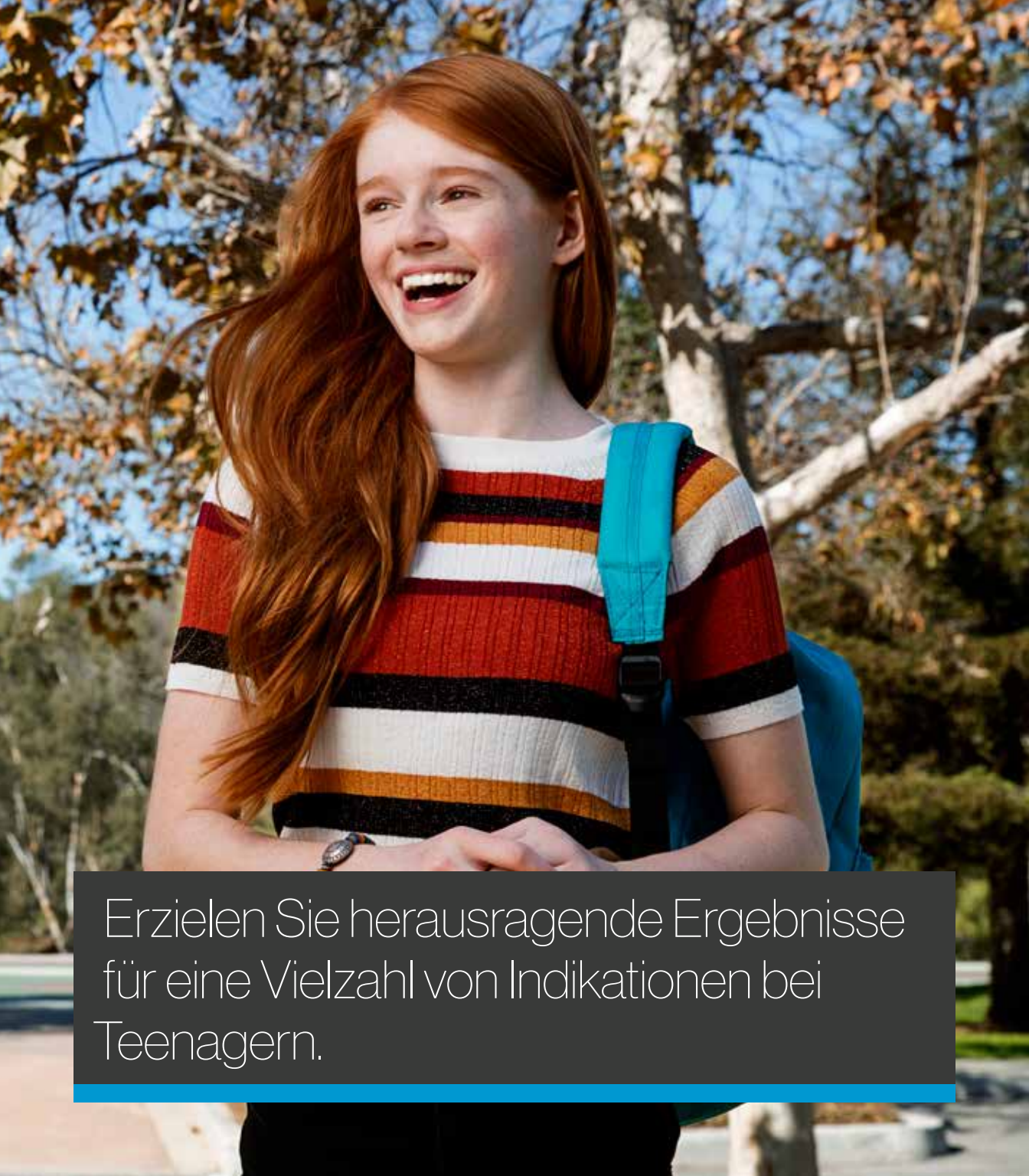

Erzielen Sie herausragende Ergebnisse für eine Vielzahl von Indikationen bei Teenagern.




70 %

Teenager, die eine kieferorthopädische Behandlung wünschen, können gemäß erfahrenen Invisalign-Kieferorthopäden mit den transparenten Invisalign-Alignern behandelt werden.*

96 %

der erfahrenen Invisalign-Kieferorthopäden erreichen mit der Invisalign-Behandlung die Ziele, die sie sich für ihre jugendlichen Patienten wünschen.*

*Daten von einer Umfrage unter 78 Kieferorthopäden, die Erfahrung bei der Behandlung von Teenagern (mindestens 40 Fälle in den letzten 8 Monaten) mit transparenten Invisalign-Alignern in Bezug auf Teenager mit permanentem Gebiss haben. Die Ärzte haben für ihren Zeitaufwand ein Honorar erhalten.

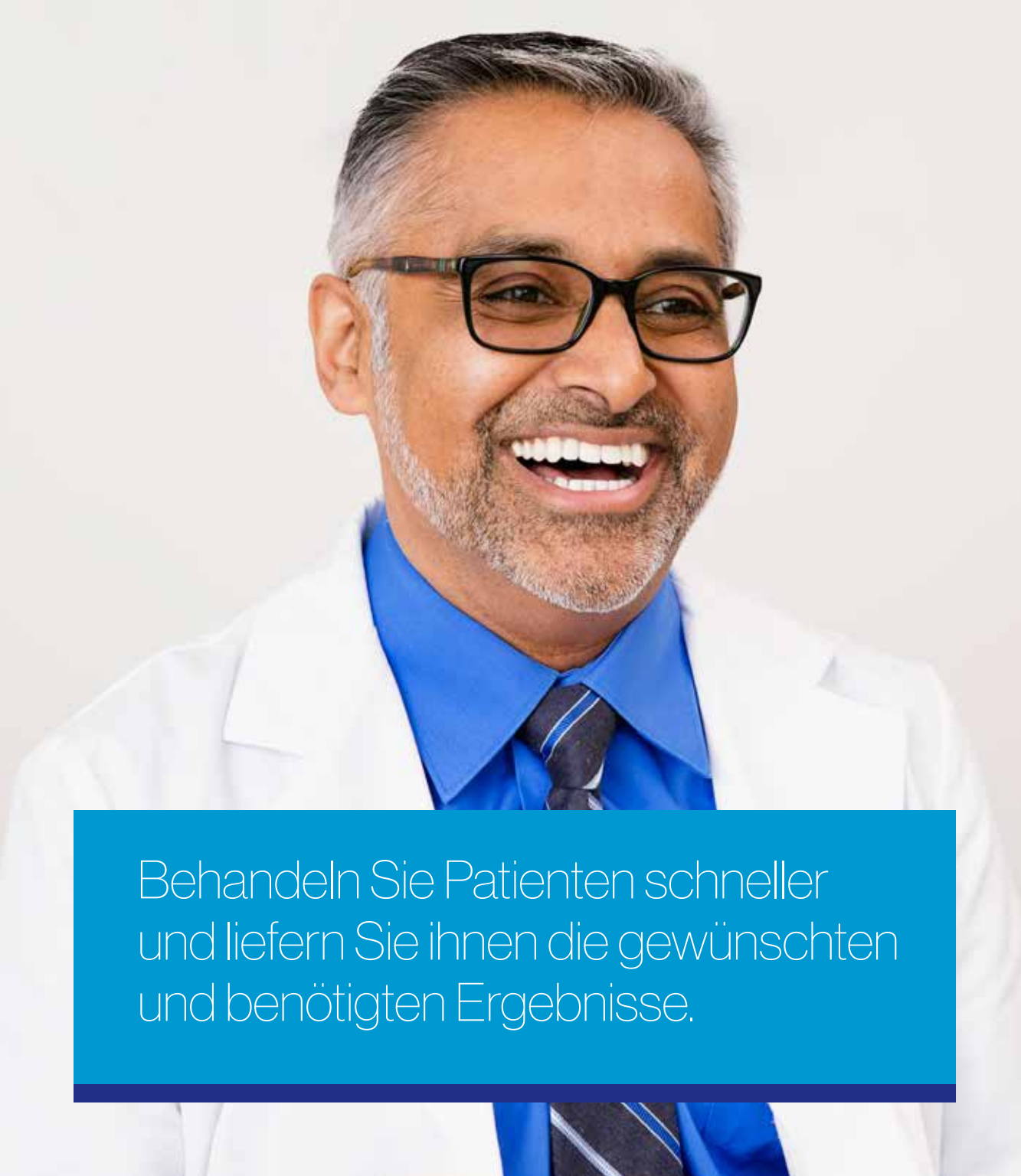

Behandeln Sie Patienten schneller
und liefern Sie ihnen die gewünschten
und benötigten Ergebnisse.



91 %

der erfahrenen Invisalign-Kieferorthopäden bewerten die Erfahrung der jugendlichen Patienten mit den transparenten Invisalign-Alignern besser als mit einer Zahnspange.*

50 % schneller

Behandlungszeit mit wöchentlichen Aligner-Wechseln. Align Technology empfiehlt jetzt wöchentliche Aligner-Wechsel um die Behandlungszeit um 50 % zu verkürzen.**

*Daten von einer Umfrage unter 78 Kieferorthopäden, die Erfahrung bei der Behandlung von Teenagern (mindestens 40 Fälle in den letzten 8 Monaten) mit transparenten Invisalign-Alignern in Bezug auf Teenager mit permanentem Gebiss haben. Die Ärzte haben für ihren Zeitaufwand ein Honorar erhalten.

**Wöchentliche Aligner-Wechsel werden für alle Invisalign-Behandlungen (mit standardmäßigem Stufeneinteilungsprotokoll) mit Invisalign Full und Invisalign Teen®-Produkten empfohlen. Die Verschreibung der wöchentlichen Aligner-Wechsel liegt im Ermessen des Arztes. Zahnbewegungen wie Rotationen, Extrusionen und signifikante Wurzelbewegungen sind zu überwachen; besonders blaue und schwarze Bewegungen in der Zahnbewegungsbeurteilung (TMA). Je nach Reaktion des Patienten auf die Behandlung, sind besonders bei älteren Erwachsenen längere Zeiträume zwischen Aligner-Wechseln in Betracht zu ziehen.



Profitieren Sie von einem wichtigen Wachstumsmotor bei der Behandlung von Teenagern.



93 %

der erfahrenen Invisalign-Kieferorthopäden geben an, dass die Behandlung von Teenagern mit den transparenten Invisalign-Alignern zum Wachstum ihrer Praxen beiträgt, da sie jedes Jahr für mehr Patienten sorgt.*

*Daten von einer Umfrage unter 78 Kieferorthopäden, die Erfahrung bei der Behandlung von Teenagern (mindestens 40 Fälle in den letzten 8 Monaten) mit transparenten Invisalign-Alignern in Bezug auf Teenager mit permanentem Gebiss haben. Die Ärzte haben für ihren Zeitaufwand ein Honorar erhalten.




Elastics und funktionskieferorthopädische Apparaturen gehören nun der Vergangenheit an.

Einführung der Invisalign-Behandlung mit mandibulärer Protrusion – eine einfachere, effizientere und patientenfreundlichere Methode.

Precision Wings im Oberkiefer



Precision Wings im Unterkiefer

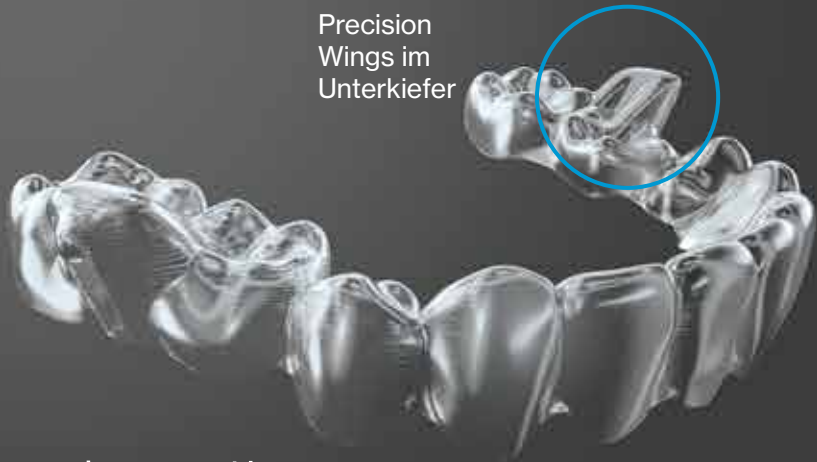

Beschreibung

Ein Paar bukkal platzierter verstärkter Precision Wings ist in den Alignern integriert, so dass die Precision Wings aktiviert werden und die Mandibula in der Vorwärtsposition halten, wenn der Patient mit den Zähnen nach unten und vorwärts beißt. Die Wings werden zwischen den ersten Molaren und Prämolaren platziert. Sie bestehen aus dem gleichen eigens entwickelten SmartTrack®-Material wie die Invisalign-Aligner. Die Invisalign-Behandlung mit mandibulärer Protrusion steht mit Invisalign Teen und mit wöchentlichen Aligner-Wechselsn zur Verfügung.




Funktionsweise



Neben der mandibulären Protrusion können die Zähne mit der Invisalign-Behandlung gleichzeitig ausgerichtet und begradigt werden.



Die Klasse-II-Korrektur kann je nach Verschreibung des Kieferorthopäden als einzelner Stufensprung oder in mehreren Sprüngen erreicht werden.

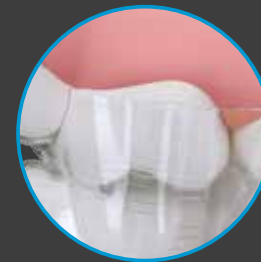

Die angehobene gingivale Schnittlinie an den Precision Wings erhöht den Patientenkomfort, indem beim Aktivieren der Precision Wings eine Irritation des Zahnfleisches verhindert wird.

Sie benötigten mehr Gründe, um sich für die Zukunft zu entscheiden?

Sparen Sie sich die Kosten und Zeit für Anpassungen und Reparaturen mit einer einzigen Einzelapparatur.

Fördern Sie die Patientenmitarbeit mit einer Behandlung ohne Elastics.

Behandeln Sie Patienten effizienter mit gleichzeitiger Klasse-II-Korrektur und Begradigung.

Steigern Sie den Patientenkomfort während der Behandlung mit einer minimalen Öffnung zwischen den Zahnbögen und individuellen Protrusionsschritten.

Behandeln Sie Patienten mit spätem Wechselgebiss mit optimierter Durchbruchkompensation für Eckzähne und Prämolare.

Korrigieren Sie einen Tiefbiss bei noch wachsenden Klasse-II-Patienten mit einer flexibleren Tiefbiss-Behandlungsplanung.



> Klinisch bewährt für Invisalign-Behandlung mit mandibulärer Protrusion

Mehr als 200 Patienten haben die Invisalign-Behandlung mit mandibulärer Protrusion erhalten.*

> Es wird Zeit, einen Wechsel zu erwägen.

Sprechen Sie mit einem Kundenvertreter von Align Technology darüber, was die Invisalign-Behandlung mit mandibulärer Protrusion für Ihre Praxis bedeuten kann.

*Vorläufige Ergebnisse einer kephalometrischen Analyse von 42 Patienten, die die Behandlungsphase mit mandibulärer Protrusion abgeschlossen haben. Die nordamerikanische Studie zeigt, dass die Invisalign-Behandlung mit mandibulärer Protrusion Klasse-II-Malokklusionen bei wachsenden jugendlichen Patienten korrigiert.