

# Tipps für einen gesunden Mund



**TePe**®

# Kleine Bürste, große Wirkung!


Für ein gesundes Lächeln ist die tägliche, gründliche Mundhygiene das A und O. Doch sollten Sie hierbei nicht nur auf Ihre Zahnbürste vertrauen. Neben Zahnseide zählen vor allem Interdentalbürsten zu den Produkten, die eine optimale Reinigung der Zahnzwischenräume ermöglichen. In dieser Broschüre erfahren Sie, warum die Zahnbürste allein nicht ausreicht und Interdentalreinigung so wichtig ist.

## Zahnärzte empfehlen TePe – und das aus gutem Grund.

Denn wir arbeiten bei der Entwicklung unserer Produkte mit zahnmedizinischen Experten zusammen. Damit stellen wir sicher, dass alle Produkte höchste Ansprüche erfüllen: in der Zahnarztpraxis, zu Hause und unterwegs.

## Täglich ran an die Zahnzwischenräume

Eine Zahnbürste allein reinigt nur drei von fünf Seiten eines Zahns – also ca. 60% der Zahnoberflächen. Die anderen 40% sind die Zahnzwischenräume, die ebenso gereinigt werden müssen. Dort entstehen schädliche Beläge, welche zu Zahnfleischentzündungen und Karies führen. Diese Entzündungen fördern wiederum Parodontitis und können zur Entstehung von Allgemeinerkrankungen beitragen. Beugen Sie deshalb vor und reinigen Sie auch täglich Ihre Zahnzwischenräume, wie vom Zahnarzt empfohlen.

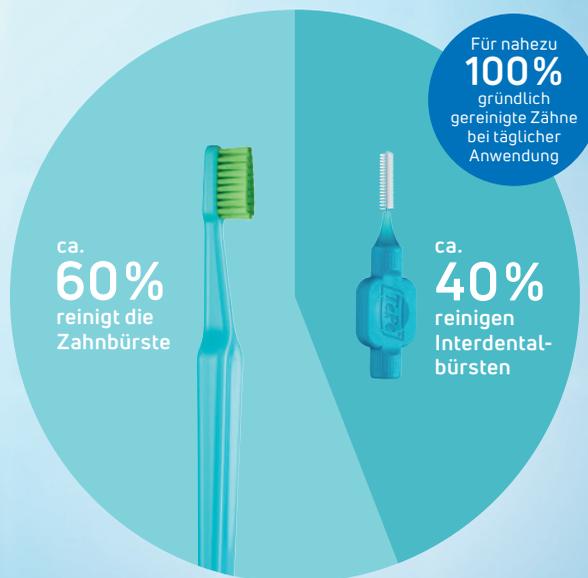

Interdentalbürste



Zahnseide



Pick

### Tipp:

Die Experten Ihrer Zahnarztpraxis helfen Ihnen gerne bei der Auswahl und richtigen Anwendung des optimalen Produkts für Ihre Bedürfnisse. So erhalten Sie nicht nur lange Ihre eigenen Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund, sondern auch ein natürliches Lächeln – ein Leben lang.




## Lückenlos sauber

TePe Interdentalbürsten wurden für die tägliche Anwendung entwickelt. Dieser Step-by-Step Guide hilft Ihnen dabei, ein nahezu 100%iges Reinigungsergebnis zu erzielen und so Ihr gesundes Lächeln zu erhalten.



## So wenden Sie Interdentalbürsten an

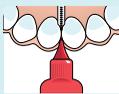

1. Beginnen Sie bei den vorderen Zähnen: Führen Sie die Bürste vorsichtig zwischen die Zähne ein. Durch Vor- und Zurückbewegung reinigen Sie die Zahnwischnräume.



2. Für die hinteren Zähne können Sie den Draht der Bürste leicht biegen, jedoch nicht abknicken. Die Größen Pink, Orange, Rot und Blau haben zusätzlich einen flexiblen Hals.




3. Führen Sie die Bürste vorsichtig zwischen die Seitenzähne ein und bewegen Sie sie vor und zurück. Borsten unter fließendem Wasser abspülen, trocknen lassen und Interdentalbürste wechseln, sobald Borsten abgenutzt sind.

# Ein strahlendes Lächeln

## Für ein gesundes Leben und eine gesunde Umwelt

Wir von TePe haben es uns zur Herzensangelegenheit gemacht, hochwertige Lösungen zu entwickeln, die gut für Mensch und Umwelt sind. Deshalb verwenden wir bei der Produktion 100% erneuerbare Energie und legen großen Wert darauf, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu minimieren.

Dabei verfolgen wir das übergeordnete Ziel, bis Ende 2022 mit allen Produkten und Verpackungen klimaneutral zu sein. Daher werden wir Schritt für Schritt unser gesamtes Portfolio umstellen. Die neuen TePe Interdentalbürsten Original setzen hierfür den nächsten Meilenstein und garantieren weiterhin höchste Qualität und Sicherheit – Für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft!

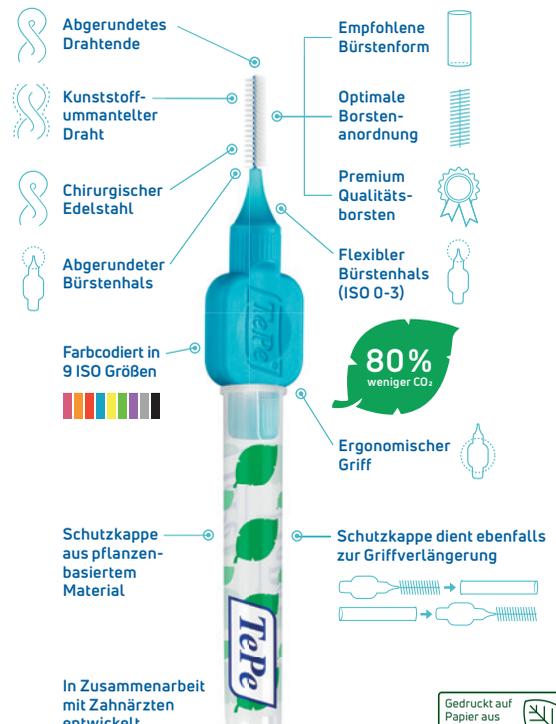

# Set für die gründliche Mundhygiene


## Reinigung der Zahnzwischenräume

Nehmen Sie sich täglich einige Minuten Zeit, um Ihre Zahnzwischenräume zu reinigen und Ihr Zahnfleisch frisch und gesund zu erhalten.

**TePe® Interdentalbürste/TePe Angle™ (1)** das effizienteste und wirksamste Mittel für die Entfernung von Plaque. Auch erhältlich in Extra Soft, für besonders empfindliches Zahnfleisch und sensible Zahnhälse.



**TePe EasyPick™ (2)** schnelle und einfache Lösung für die Zahnzwischenraumreinigung zu Hause oder unterwegs.

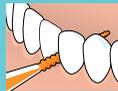

**TePe GOOD Mini Flosser™ (3)** handlicher Zahnseide-Stick aus nachwachsenden Rohstoffen für eine einfache Anwendung.



**TePe® Dental Tape (4)** besonders geeignet für enge Zahnzwischenräume. Mit leichtem Minzgeschmack für ein frisches Mundgefühl.



## Zahnbürsten

Ein wichtiger Schritt bei der täglichen Reinigung ist selbstverständlich auch die Zahnbürste. Wählen Sie eine Zahnbürste mit weichen oder extra weichen Borsten für eine sanfte Reinigung.

**TePe Select™ (5)** hochwertige Zahnbürste mit extra weichen Borsten für jedermann.

**TePe GOOD™ Regular (6)** eine nachhaltige Zahnbürste, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.

**TePe Supreme™ (7)** mit konischem Borstenfeld in zwei Längen, um den Zahnfleischrand besser zu reinigen.



## Schlechten Atem vermeiden

Mundgeruch wird häufig durch Bakterien auf der Zunge verursacht. Ein paar Züge mit einem Zungenreiniger können helfen.

**TePe GOOD™ Zungenreiniger (8)** gegen Mundgeruch, für eine bessere Mundhygiene.



## Zahnputztest

**TePe PlaqSearch™ (9)** zeigt Ihnen auch schwer zu findenden Zahnbelag an. Kauen Sie die Tablette, bis sie sich aufgelöst hat. Verteilen Sie die entstehende Flüssigkeit mit der Zunge auf allen Zahnoberflächen und spülen Sie dann den Mund einmal aus. Die Verfärbungen zeigen, wo Sie noch besser putzen sollten.



# Erhältlich in Ihrer Apotheke



Made in Sweden

## TePe Interdentalprodukte

### Original

**0,4 mm** DE 07641185  
AT 3698509  
CH 5787329



**0,6 mm** DE 07641311  
AT 3698225  
CH 5787341



**1,1 mm** DE 07641392  
AT 3698484  
CH 5787370



**0,45 mm** DE 07641191  
AT 3698490  
CH 5787387



**0,7 mm** DE 07641328  
AT 3698366  
CH 5787364



**1,3 mm** DE 07641423  
AT 3698455  
CH 5787393



**0,5 mm** DE 07641305  
AT 3698449  
CH 5787335



**0,8 mm** DE 07641386  
AT 3698461  
CH 5787358



**1,5 mm** DE 07641446  
AT 3698478  
CH 7169340



### Extra Soft

**0,45 mm** DE 09724768  
AT 3995756  
CH 5787430



**0,7 mm** DE 09724840  
AT 3995785  
CH 5787476



**0,5 mm** DE 09724805  
AT 3995762  
CH 5787447



**0,8 mm** DE 09724863  
AT 3995791  
CH 5787482



**0,6 mm** DE 09724834  
AT 3995779  
CH 5787453



**1,1 mm** DE 09724892  
AT 3995816  
CH 5787499



### Angle

**0,4 mm** DE 07708682  
AT 3793260  
CH 5782929



**0,6 mm** DE 07708860  
AT 3793308  
CH 5782958



**0,45 mm** DE 07708713  
AT 3793277  
CH 5782935



**0,7 mm** DE 07708877  
AT 3793314  
CH 5782964



**0,5 mm** DE 07708848  
AT 3793283  
CH 5782941



**0,8 mm** DE 07709032  
AT 3793320  
CH 5782970



### EasyPick

**XS/S** DE 10731992  
AT 4261051  
CH 6687529



**M/L** DE 10732017  
AT 4261068  
CH 6687512



### GOOD Mini Flosser

  
DE 15400455  
AT 5070376  
CH 7769631

### Dental Tape


  
DE 11535170  
AT 4383736  
CH 7169334

## TePe Spezialprodukte

### PlaQSearch

  
DE 04807544  
AT 4098013  
CH 7790185

### GOOD Zungenreiniger

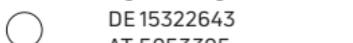  
DE 15322643  
AT 5053395  
CH 7741064

### Zur Bestellung in der Apotheke:

DE = PZN AT = PHZ CH = Pharmacode

## TePe Zahnbürsten



**Select, Extra Soft** DE 08863663  
AT 2013076  
CH 7790194



**GOOD Regular** DE 14273486  
AT 4861673  
CH 7741062



**Supreme** DE 01972372  
AT 3118653  
CH 7169357

Ausgewählte TePe Produkte sind auch in Drogerien oder dem Lebensmittel-einzelhandel erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

### TePe D-A-CH GmbH

Langenhorner Chaussee 44 a  
22335 Hamburg, Deutschland  
Tel. DE: +49 (0)40 570 123-0  
Tel. AT: +43 (0)15 444 044  
Tel. CH: +41 (0)71 788 230 0  
kontakt@tepe.com www.tepe.com

