


SYSTEMÜBERSICHT

Tiny® Implantate
Externa® Implantate

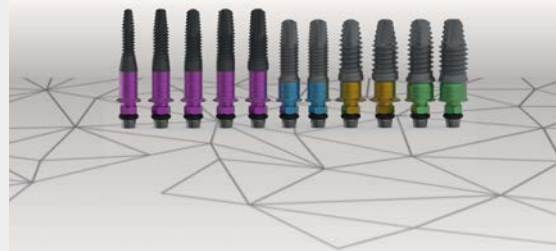

Human Technology

SYSTEMÜBERSICHT

Diese Broschüre bietet dem Anwender einen Überblick über die chirurgischen und prothetischen Möglichkeiten des BTI Implantatsystems.

Unter anderem sind Informationen zum optimalen Bohrprotokoll in Abhängigkeit der Knochendichte und der jeweiligen Implantatdimensionen enthalten.


Darüber hinaus werden die verschiedenen Instrumente und Werkzeuge für die Chirurgie und Prothetik inklusive der Drehmomentratschen und Schraubendreher gezeigt.

Durch die übersichtliche Darstellung lassen sich die verschiedenen Materialien für die chirurgischen und prothetischen Schritte durchgängig nachvollziehen, unabhängig davon, ob man sich für eine Restauration direkt auf Implantatniveau oder mit Distanzhülsen entscheidet, egal ob zementiert oder verschraubt. Alle Komponenten sind samt Artikelnummern und Abmessungen aufgeführt.

BOHRSEQUENZEN FÜR TINY® UND EXTERNA® IMPLANTATE

Klasse	Hounsfield
I	1050 -1400
II	850 -1000
III	550 - 800
IV	400 - 500
V	100 - 350

POSITIONEN DER LASERMARKIERUNGEN

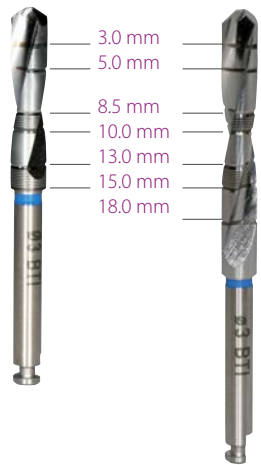


ACHTUNG! Diese Sequenzen stellen eine Richtlinie für die Aufbereitung bei 50 U/min dar.


Bohrer	Umdrehungszahl	Kühlung
Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
Spiralbohrer	50 - 75 U/min	nein
Versenker	150 - 200 U/min	nein

Human
Technology


Tiny® Implantate ø2.5 mm

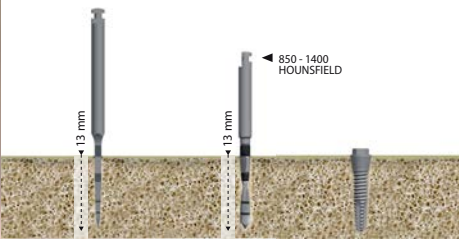


Tiny® Implantate ø3.0 mm

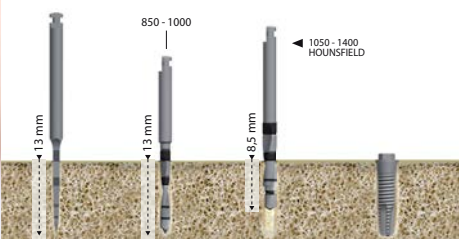


Tiny® Implantate ø3.3 mm

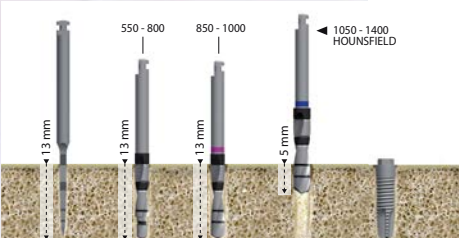


Tiny® Implantate ø3.5 mm

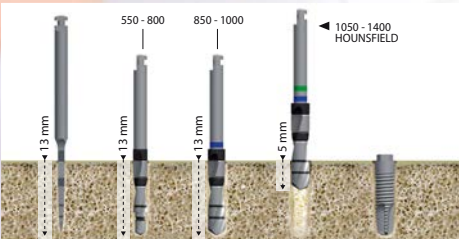


Implante Tiny® 3,75 mm. ø

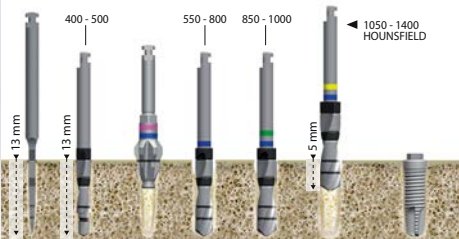


Implantate ø3.75 mm mit Standard-Plattform

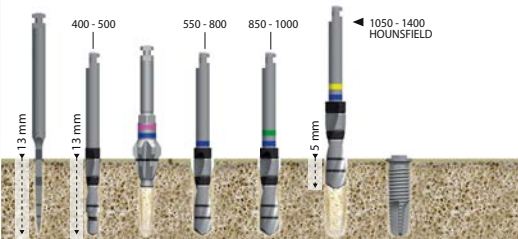


Implantate ø4.0 mm mit Standard-Plattform

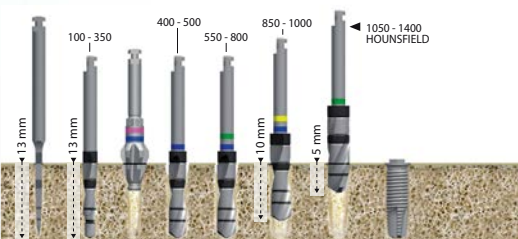

Plus Implantate ø4.5 mm mit Standard-Plattform

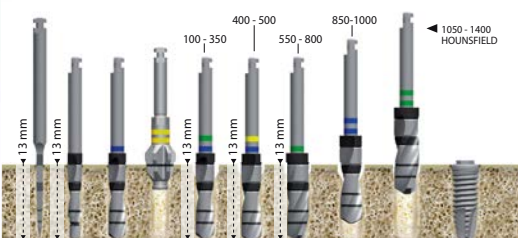


Plus Implantate ø5.0 mm mit Standard-Plattform

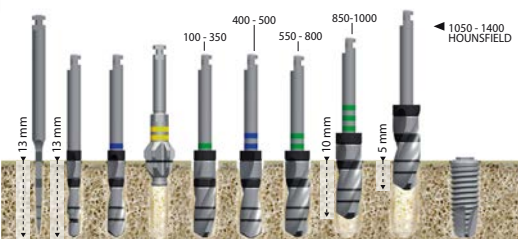


Plus Implantate Ø 5.0mm EXTRA-KURZE



Implantate ø5.0 mm mit 5.5 mm Plattform

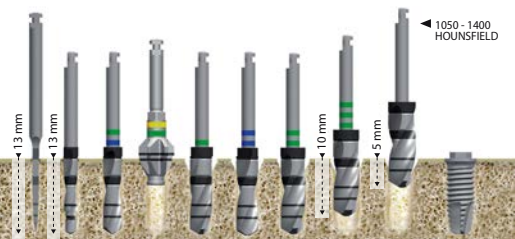

Implantate ø5.5 mm mit 5.5 mm Plattform

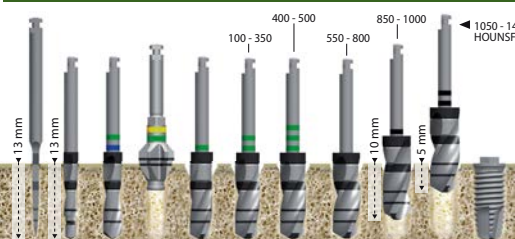


Initialbohrer



Art. - Nr.	Länge
FICS	10 mm
FIL	15 mm

Spiralbohrer

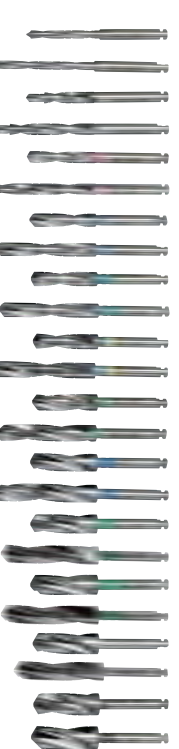

Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
F18CS	1.8	13 mm
F18LS	1.8	18 mm
F1825CS	1.8 > 2.5	13 mm
F1825LS	1.8 > 2.5	18 mm
F25CS	2.5	13 mm
F25LS	2.5	18 mm
F30CS	3.0	13 mm
F30LS	3.0	18 mm
F32CS	3.25	13 mm
F32LS	3.25	18 mm
F35CS	3.5	13 mm
F35LS	3.5	18 mm
F38CS	3.8	13 mm
F38LS	3.8	18 mm
F40CS	4.0	13 mm
F40LS	4.0	18 mm
F43CS	4.3	13 mm
F43 LS	4.3	18 mm
F45CS	4.5	13 mm
F45LS	4.5	18 mm
F48CS	4.8	13 mm
F48LS	4.8	18 mm
F51CS	5.1	13 mm
F53CS	5.3	13 mm

Versenker



Art. - Nr.		Ø(mm)	Länge
INFAPUC	Standard-Plattform kurz	4.1	5 mm
INFAPUL	Standard-Plattform lang	4.1	5 mm
INFAPSC	Externa/Interna Plus kurz	4.5	4.5 mm
INFAPSL	Externa/Interna Plus lang	4.5	4.5 mm
INFAPAC	5.5mm Plattform kurz	5.5 und 6	4.5 und 5 mm
INFAPAL	5.5mm Plattform lang	5.5 und 6	4.5 und 5 mm

Bohrer mit frontaler Schneide



Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
FCF30L	3.0	13 mm
FCF35L	3.5	13 mm
FCF45L	4.5	13 mm
FCF51L	5.1	13 mm

Einmalbohrer-Sets



Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
KFD1	Initial Pilot 1.8 > 2.5 mm Pilot 2.5 > 3.0 mm	15 mm 18 mm 18 mm
KFD2	Initial Pilot 1.8 > 2.5 mm Pilot 2.5 > 3.0 mm Pilot 3.2 > 3.8 mm	15 mm 18 mm 18 mm 18 mm


BTI Mehrweg-Bohrer

BTI Einmal-Bohrer


BTI Crest Expansoren

KAMMSPREIZUNG

Tiny® Implantate ø 2.5 mm

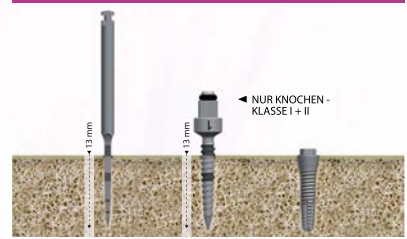

Tiny® Implantate ø 3.0 mm.

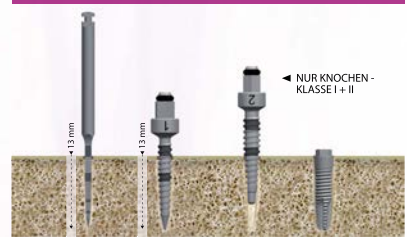

Tiny® Implantate ø 3.3 mm.



Tiny® Implantate ø 3.5 mm.



Tiny® Implantate ø 3.75 mm.



KNOCHENVERDICHUNG

Implantate ø 3.75 mm mit Standard-Plattform



Implantate ø 5.0 mm mit 5.5 mm Plattform



BTI Crest-Expansoren

JEXP Artikel



Inhalt
Instrument Nr. 1. lang
Instrument Nr. 2. lang
Instrument Nr. 3. lang
Instrument Nr. 4. lang
Winkelstückeinsatz, lang
Ratscheneinsatz, lang
Metall-Box

Ø Apex	Ø Körper	Länge
1.4 mm	2.0 mm	15 mm
1.6 mm	2.6 mm	15 mm
2.1 mm	3.1 mm	15 mm
2.8 mm	3.8 mm	15 mm



JCOM Artikel



Inhalt
Instrument Nr. 1. kurz
Instrument Nr. 2. kurz
Instrument Nr. 3. kurz
Instrument Nr. 4. kurz
Winkelstückeinsatz, kurz
Ratscheneinsatz, kurz
Metall-Box,rot

Ø Apex	Ø Körper	Länge
1.4 mm	2.0 mm	11.5 mm
1.6 mm	2.6 mm	11.5 mm
2.1 mm	3.1 mm	11.5 mm
2.8 mm	3.8 mm	11.5 mm



KEXCO Artikel




Inhalt
Initialbohrer, kurz
Inhalt JEXP (ohne Metall-Box)
Inhalt JCOM (ohne Metall-Box)
Kunststoff-Box

IET




Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
IET2585	2.5	8,5 mm
IET2511	2.5	11,5 mm
IET3085	3.0	8,5 mm
IET3011	3.0	11,5 mm

Expansions-Implantate Ø2,5mm

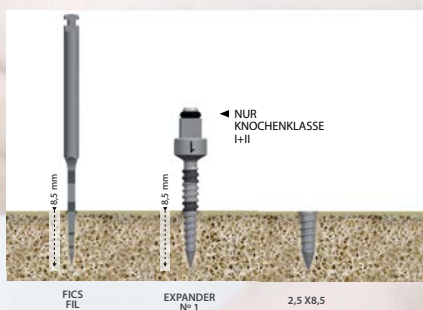

Expansions-Implantate Ø3,0mm

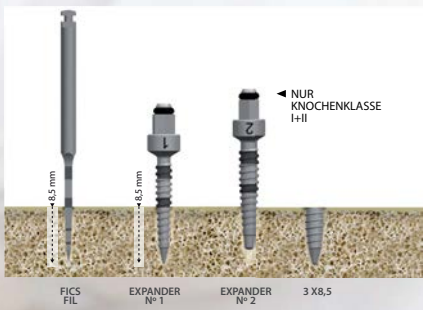

BTI Expansions-Implantate

Zubehör für Chirurgie und Prothetik

Chirurgische Ratsche



Artikel


Art. - Nr.

Inhalt

LLMQ

Chirurgische Drehmoment-Ratsche
20 - 70 Ncm

Schraubendreher

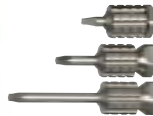

Artikel

Sechskant-Schraubendreher
(großer Sechskant)

Art. - Nr.

DHG17
DHG24
DHG36

Länge

17 mm
24 mm
36 mm

Vierkant-Schraubendreher

DC17
DC24
DC36

17 mm
24 mm
36 mm

Distanzhülsen-Schraubendreher

DCE17
DCE24

17 mm
24 mm

Locator Multi-Werkzeug

HPL

Sechskant-Schraubendreher
(kleiner Sechskant)
ACHTUNG! Nur für TINY® Deckschrauben
und kopflose Deckschrauben!

DHP24

24 mm

Drehmomentratschen
Prothetik



Artikel

Art. - Nr.

Drehmoment

Multi-Drehmomentratsche
inkl. Adapter für
Drehmomentratschen-Einsätze
und Winkelstück-Einsätze

LLMTP

10-35 Ncm

Drehmomentratschen-Einsätze



Winkelstück-Einsätze



Zubehör für Chirurgie und Prothetik

Artikel

Art. - Nr.

Länge

Sechskant
(großer Sechskant, konisch)

PTH16
PTH22

16 mm
22 mm

Vierkant

PTC16
PTC22

16 mm
22 mm

Sechskant
(großer Sechskant, parallelwandig)

PTHS16
PTHS22

16 mm
22 mm

Vierkant
(parallelwandig)

PTCS16
PTCS22

16 mm
22 mm

Sechskant (kleiner Sechskant)
ACHTUNG! Nur für TINY® Deckschrauben und
kopflose Deckschrauben

PTHP16
PTHP22

16 mm
22 mm

Für Distanzhülsen

PTCE16
PTCE22

16 mm
22 mm

Abgerundet
(für Schrauben mit reduziertem Schraubenkopf,
Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°)

PTHA16
PTHA22
PTHA28
PTHA34

16 mm
22 mm
28 mm
34 mm

Sechskant abwinkelbar
Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°

PTHB16
PTHB22
PTHB28
PTHB34

16 mm
22 mm
28 mm
34 mm

Für Locator-Abutments

PTTL15
PTTL21

15 mm
21 mm

Für Dal-Bo Abutments

PTDO

16 mm

Handgriff für Ratscheneinsätze

MDPT1

Artikel

Art. - Nr.

Länge

Sechskant
(großer Sechskant)

PHG17
PHG24
PHG30

17 mm
24mm
30 mm

Vierkant

PDC17
PDC24
PDC30

17 mm
24 mm
30 mm

Für Locator-Abutments

PTL23
PTL29

23 mm
29 mm

Für Titanmagnetics

TIXL-LLT

Sechskant (kleiner Sechskant)
ACHTUNG! Nur für TINY® Deckschrauben und
kopflose Deckschrauben

PHP24

24 mm


Schlitz
ACHTUNG! Exklusiv für Interna® Gingivaformer

PDP24

24 mm

Handgriff für Winkelstückeinsätze

LLEC1

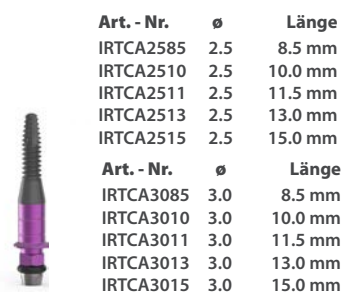

Art. - Nr.	Ø	Länge
IRTCA2585	2.5	8.5 mm
IRTCA2510	2.5	10.0 mm
IRTCA2511	2.5	11.5 mm
IRTCA2513	2.5	13.0 mm
IRTCA2515	2.5	15.0 mm
Art. - Nr.	Ø	Länge
IRTCA3085	3.0	8.5 mm
IRTCA3010	3.0	10.0 mm
IRTCA3011	3.0	11.5 mm
IRTCA3013	3.0	13.0 mm
IRTCA3015	3.0	15.0 mm


Art. - Nr.	Ø	Länge
IRTCA3385	3.3	8.5 mm
IRTCA3310	3.3	10.0 mm
IRTCA3311	3.3	11.5 mm
IRTCA3313	3.3	13.0 mm
IRTCA3315	3.3	15.0 mm
Art. - Nr.	Ø	Länge
IRTCA3565	3.5	6.5 mm
IRTCA3575	3.5	7.5 mm
IRTCA3585	3.5	8.5 mm
IRTCA3510	3.5	10.0 mm
IRTCA3511	3.5	11.5 mm
IRTCA3513	3.5	13.0 mm
IRTCA3515	3.5	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IRTCA3745	3.75	4.5 mm
IRTCA3755	3.75	5.5 mm
IRTCA3765	3.75	6.5 mm
IRTCA3775	3.75	7.5 mm
IRTCA3785	3.75	8.5 mm
IRTCA3710	3.75	10.0 mm
IRTCA3711	3.75	11.5 mm
IRTCA3713	3.75	13.0 mm
IRTCA3715	3.75	15.0 mm

ACHTUNG! Kopflose Deckschraube mit kleinem Sechskant!

Deckschraube
(optional)

Art. - Nr.
TCIPT
10 Ncm

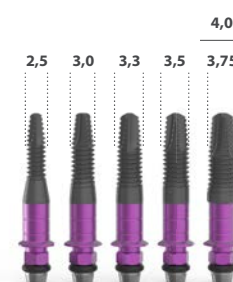

Ø Kragen

Ø Implantat

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für zementierte und verschraubte Einzelkronen sowie mehrgliedrige Versorgungen.

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCT32	3.5	2 mm
PCT33	3.5	3 mm
PCT34	3.5	4 mm
PCT35	3.5	5 mm
PCT36	3.5	6 mm

Kopflose Deckschraube
Mikroschraube

Art. - Nr.
TCITS

Achtung: kleiner Sechskant

Abformpfosten

Pick - Up - Typ (mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIITE	3.5	12 mm

(ohne Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIRIT4	3.5	12 mm

Transfer - Typ	
Art. - Nr.	Ø
CIDT	3.5

Laboranalog

Art. - Nr.
RLIE

Prov. Zylinder Titan

Art. - Nr.
CPIE1 (mit Rotationsschutz)
CPIE0 (ohne Rotationsschutz)

Prov. Zylinder Kunststoff

Art. - Nr.
CPIEP1 (mit Rotationsschutz)
CPIEP0 (ohne Rotationsschutz)

Gold - Abutment

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPAOE42	3.7/4.2	2 mm
PPAOE44	3.7/4.2	4 mm

Titan - Abutment 15°

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPATEA32	3.7/4.2	2 mm
PPATEA34	3.7/4.2	4 mm

Titan - Bioabutment® (Ti Golden)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPATEB43	4.2	3 mm
PPATEB44	4.2	4 mm
PPATEB45	4.2	5 mm

Titan - Bioabutment® 15° (Ti Golden)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTEAB33	3.7/4.2	3 mm
PPTEAB34	3.7/4.2	4 mm
PPTEAB35	3.7/4.2	5 mm

Ästhetik Abutment (Ti Golden)

(mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
PTTZ0	3.5	0 mm
PTTZ2	3.5	2 mm
PTTZ3	3.5	3 mm
PTTZ4	3.5	4 mm

UCLA Abutment

Art. - Nr. (Gold)	
PUOE1 (mit Rotationsschutz)	
PUOE0 (ohne Rotationsschutz)	
Art. - Nr. (Kunststoff)	
PUCE1 (mit Rotationsschutz)	
PUCE0 (ohne Rotationsschutz)	

Aufwachsschraube

Art. - Nr.
TEIU15 (kurz)
TEIT (lang)

Laborschraube

Art. - Nr.
TTLH (5 St.) (Sechskant)

Halteschrauben


Gold Art. - Nr.
TOTC (Vierkant) 35 Ncm

Ti Black Art. - Nr.
TTTH (Sechskant) 35 Ncm

Ti Black Art. - Nr.
TTTHR (Sechskant, reduzierter Schraubenkopf) Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15° 20 Ncm

Ti Black Art. - Nr.
TTTH30 Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30° 20 Ncm

Achtung: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX

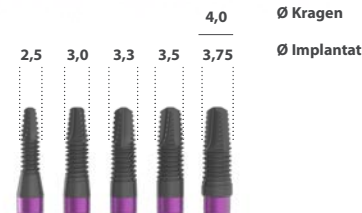

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Prothesen.

INDIREKTE RESTAURATIONEN

MULTI-IM® Distanzhülse (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
TMIPE15	1.5 mm
TMIPE20	2.0 mm
TMIPE30	3.0 mm
TMIPE40	4.0 mm
35 Ncm	

Schutzkappe für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø
TPMIEU	4.0
10 Ncm	

Abformpfosten für MULTI-IM® Distanzhülse

Pick - Up - Typ	Art. - Nr.	Ø
	CIMIPEU	4.0

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEU1	4.0	6 mm
IROMIEU	4.0	9 mm

Laboranalog für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIEU


Prov. Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Ti)
CPMIPEU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CPMIPEUP

Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Gold)
COMIPEU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIPEU
Art. - Nr. (Ti f. CAD/CAM)
CZMIPEU

Steggelenke für Provisorien auf MULTI-IM

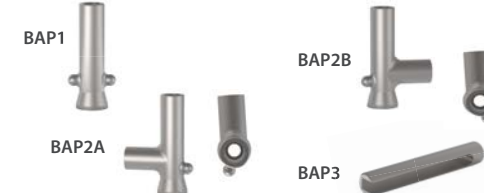

Aufwachsschraube für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Höhe
TEMIR (reduzierter Durchmesser)	15 mm

Halteschrauben Sechskant MULTI-IM® Zylinder

Ti Black Art. - Nr.
TTMIR (Sechskant, reduzierter Schraubenkopf) Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15° 20 Ncm
Ti Black Art. - Nr.
TTMI30 (Sechskant) Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30° 20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX

MULTI-IM® Distanzhülse 17° (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
TMIPEA20	2.0 mm
TMIPEA30	3.0 mm
35 Ncm	

Schutzkappe MULTI-IM® 17°

Art. - Nr.	Ø
TPMIEUA	5.0
10 Ncm	

Abformpfosten MULTI-IM® 17°

Pick - Up - Typ	Art. - Nr.	Ø
	CIMIPEUA	5.0

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø
IROMIEUA	4.0

Laboranalog MULTI-IM® 17°

Art. - Nr.
RLMIEUA

Prov. Zylinder MULTI-IM® 17°

Art. - Nr. (Ti)
CPMIPEUA

Zylinder für MULTI-IM® 17°

Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIPEUA

COVER - DENTURE RESTAURATIONEN

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCT32	3.5	2 mm
PCT33	3.5	3 mm
PCT34	3.5	4 mm
PCT35	3.5	5 mm
PCT36	3.5	6 mm
20 Ncm		

Kopfloze Deckschraube Mikroschraube

	Art. - Nr.
	TCITS
	10 Ncm

Achtung: kleiner Sechskant

Abformpfosten

Pick - Up - Typ (mit Rotationsschutz)	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	CIITE	3.5	12 mm

(ohne Rotationsschutz)	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	CIRIT4	3.5	12 mm

Transfer - Typ	Art. - Nr.	Ø
	CIDT	3.5

Laboranalog

Art. - Nr.
RLIE

Dalbo® Abutment

Art. - Nr.	Höhe
MTDT3	3 mm
MTDT4	4 mm
20 Ncm	

Titanmagnetics

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TIXL-4838IT	4.8	3.8 mm
20 Ncm		

Dalbo® Matrizen

Art. - Nr.
HTDS (standard)
HTDP (plus)


Magnet für Deckprothese

Art. - Nr.	Höhe
TIXL-S265	2.65 mm

Positionierhilfe

Art. - Nr.
TIXL-MPS

Ø Kragen
 Ø Implantat

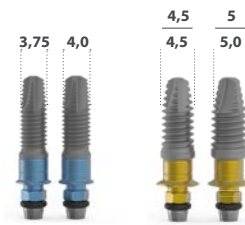

Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPU3765	3.75	6.5 mm
IRPU3775	3.75	7.5 mm
IRPU3785	3.75	8.5 mm
IRPU3710	3.75	10 mm
IRPU3711	3.75	11.5 mm
IRPU3713	3.75	13 mm
IRPU3715	3.75	15 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPU4065	4.0	6.5 mm
IRPU4075	4.0	7.5 mm
IRPU4085	4.0	8.5 mm
IRPU4010	4.0	10 mm
IRPU4011	4.0	11.5 mm
IRPU4013	4.0	13 mm
IRPU4015	4.0	15 mm
IRPU4018	4.0	18 mm

Kopfloze Deckschraube
 (optional)

Art. - Nr.
 TCISC
10 Ncm
 ACHTUNG! Kleiner Sechskant



Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPS4565	4.5	6.5 mm
IRPS4575	4.5	7.5 mm
IRPS4585	4.5	8.5 mm
IRPS4510	4.5	10 mm
IRPS4511	4.5	11.5 mm
IRPS4513	4.5	13 mm
IRPS4515	4.5	15 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPS5065	5.0	6.5 mm
IRPS5075	5.0	7.5 mm
IRPS5085	5.0	8.5 mm
IRPS5010	5.0	10 mm
IRPS5011	5.0	11.5 mm
IRPS5013	5.0	13 mm
IRPS5015	5.0	15 mm

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCU42	4.0	2 mm
PCU43	4.0	3 mm
PCU44	4.0	4 mm
PCU46	4.0	6 mm
PCU48	4.0	8 mm
PCU52	5.0	2 mm
PCU53	5.0	3 mm
PCU54	5.0	4 mm
PCU56	5.0	6 mm
PCU58	5.0	8 mm

20 Ncm

Abformpfosten

Pick - Up - Typ (mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIU4	4.0	12 mm
CIU5	5.0	12 mm
(ohne Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIRIU4	4.0	12 mm
Transfer-Typ		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIDU	4.0	12 mm

Laboranalog

Art. - Nr.
RLIU

Prov. Zylinder Titan

Art. - Nr.
(mit Rotationsschutz) CPIU1
(ohne Rotationsschutz) CPIU0

Prov. Bioabutment®

Art. - Nr.	Ø	Höhe
(mit Rotationsschutz) CPIUB13	5.0	3 mm
CPIUB14	5.0	4 mm
(ohne Rotationsschutz) CPIUB03	5.0	3 mm
CPIUB04	5.0	4 mm

Prov. Zylinder Kunststoff

Art. - Nr.
CPIUP1 (mit Rotationsschutz)
CPIUP0 (ohne Rotationsschutz)

Prov. Abutment Kunststoff

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPUP44	4.0	4 mm
PPUP54	5.0	4 mm

Gold - Abutment

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPOU42	4.1	2 mm
PPOU52	5.0	2 mm

Titan - Abutment

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTU42	4.1	2 mm
PPTU44	4.1	4 mm
PPTU52	5.0	2 mm
PPTU53	5.0	3 mm
PPTU54	5.0	4 mm
PPTU56	5.0	6 mm
PPTU62	6.0	2 mm
PPTU63	6.0	3 mm
PPTU64	6.0	4 mm

Titan - Abutment 15°

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTUA52	5.0	2 mm
PPTUA53	5.0	3 mm
PPTUA54	5.0	4 mm

Titan - Bioabutment® (Ti Golden)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTUB53	5.0	3 mm
PPTUB54	5.0	4 mm
PPTUB55	5.0	5 mm

Titan - Bioabutment® 15° (Ti Golden)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTUAB53	5.0	3 mm
PPTUAB54	5.0	4 mm
PPTUAB55	5.0	5 mm

CERAMIC-ON® Abutment

Art. - Nr. (Gold)	Ø
PPCOU	5.0
Art. - Nr. (Ti)	Ø
PPCTU	5.0

Titan-Abutment für CAD-CAM (Ti Golden)

(mit Rotationsschutz)	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	PUTZ0	4.1	0 mm
	PUTZ2	4.1	2 mm
	PUTZ3	4.1	3 mm
	PUTZ4	4.1	4 mm

Art. - Nr. (Kunststoff)
 CPUTZ
 (ausbrennbare Hülse)

UCLA - Abutment

Art. - Nr. (Gold)
PUOU1 (mit Rotationsschutz)
PUOU0 (ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr. (Kunststoff)
PUCU1 (mit Rotationsschutz)
PUCU0 (ohne Rotationsschutz)

Aufwachsschraube

Art. - Nr.
TEIU15 (kurz)
TEIT (lang)

Laborschraube

Art. - Nr.
TTLH (5 St.) (Sechskant)

Halteschrauben


Gold
Art. - Nr. TOOC (Vierkant) 35 Ncm

Ti Black
Art. - Nr. TTUH (Sechskant) 35 Ncm

Ti Black
Art. - Nr. TTUHR (Sechskant, reduzierter Schraubenkopf) Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15° 20 Ncm

Ti Black
Art. - Nr. TTUH30 Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30° 20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
 kompatibel mit PTHBXX

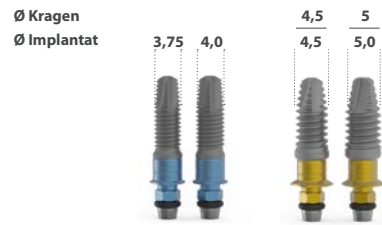

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Prothesen.

INDIREKTE RESTAURATIONEN

MULTI-IM® Distanzhülse
(Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
TMIPU10	1 mm
TMIPU20	2 mm
TMIPU30	3 mm
TMIPU40	4 mm
35 Ncm	

Schutzkappe für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø
TPMIEU	4.0
10 Ncm	

Abformpfosten for MULTI-IM® Distanzhülse

Pick - Up - Typ	Ø
Art. - Nr. CIMIEU	4.0

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEU1	4.0	6 mm
IROMIEU	4.0	9 mm

Laboranalog für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIEU

Prov. Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Ti)
CPMIEU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CPMIEUP

Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Gold)
COMIEU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIEU
Art. - Nr. (Ti f. CAD/CAM)
CZMIEU

Steggelenke für Provisorien auf MULTI-IM



Aufwachsschraube für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Höhe
TEMIR (reduzierter Durchmesser)	15 mm

Halteschrauben Sechskant MULTI-IM® Zylinder

Ti Black Art. - Nr.
TTMIR (Sechskant, reduzierter Schraubenkopf) Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°
20 Ncm

Ti Black Art. - Nr.
TTMI30 (Sechskant) Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°
20 Ncm

Achtung: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX

MULTI-IM® Distanzhülse 17°
(Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
TMIPUA15	1.5 mm
TMIPUA20	2 mm
TMIPUA30	3 mm
TMIPUA40	4 mm
TMIPUA50	5 mm
35 Ncm	

Schutzkappe MULTI-IM® 17°

Art. - Nr.	Ø
TPMIEUA	5.0
10 Ncm	

Abformpfosten MULTI-IM® 17°

Pick - Up - Typ	Ø
Art. - Nr. CIMIEUA	5.0

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø
IROMIEUA	5.0

Laboranalog für MULTI-IM® 17°

Art. - Nr.
RLMIEUA

Prov. Zylinder für MULTI-IM® 17° Distanzhülse

Art. - Nr. (Ti)
CPMIEUA

Zylinder für MULTI-IM® 17°

Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIEUA

COVER - DENTURE RESTAURATIONEN

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCU42	4.0	2 mm
PCU43	4.0	3 mm
PCU44	4.0	4 mm
PCU46	4.0	6 mm
PCU48	4.0	8 mm
PCU52	5.0	2 mm
PCU53	5.0	3 mm
PCU54	5.0	4 mm
PCU56	5.0	6 mm
PCU58	5.0	8 mm
20 Ncm		

Abformpfosten

Pick - Up - Typ (mit Rotationsschutz)	Ø
Art. - Nr. CIU4	4.0
CIU5 (ohne Rotationsschutz)	5.0
Art. - Nr.	Ø
CIRIU4	4.0

Laboranalog

Art. - Nr.
RLIU

Locator Abutment

Art. - Nr.	Höhe
PLEU10	1 mm
PLEU20	2 mm
PLEU30	3 mm
PLEU40	4 mm
30 Ncm	

Dalbo® Abutment

Art. - Nr.	Höhe
MTD2	2 mm
MTD3	3 mm
MTD4	4 mm
20 Ncm	

Titanmagnetics

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TIXL-4835EU	4.8	3.5 mm
TIXL-4850EU	4.8	5.0 mm
20 Ncm		

Abformpfosten

Art. - Nr.
CIL (4 St.)

Dalbo® Matrizen

Art. - Nr.
HTDS (standard)
HTDP (plus)

Magnet für Deckprothese

Art. - Nr.	Höhe
TIXL-S265	2.65 mm

Locator Analog

Art. - Nr.
RLL4 (4 St.)

Positionierhilfe

Art. - Nr.
TIXL-MPS

Locator Bearbeitungs - Set

Art. - Nr.
JML2 (2 St.)
JML10 (10 St.)

Locator Retentionseinsätze

Art. - Nr.	Retention	Angulation
MLRA (4 St.)	x-tra leicht	0-10°
MLRR (4 St.)	leicht	0-10°
MLST (4 St.)	stark	0-10°
MLAR (4 St.)	x-tra leicht	10-20°
MLAN (4 St.)	leicht	10-20°
MLAV (4 St.)	stark	10-20°
MLAG (4 St.)	ohne Retention	10-20°



Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPA5075	5.0	7.5 mm
IRPA5085	5.0	8.5 mm
IRPA5010	5.0	10.0 mm
IRPA5011	5.0	11.5 mm
IRPA5013	5.0	13.0 mm
IRPA5015	5.0	15.0 mm


Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPA5575	5.5	7.5 mm
IRPA5585	5.5	8.5 mm
IRPA5510	5.5	10.0 mm
IRPA5511	5.5	11.5 mm
IRPA5513	5.5	13.0 mm
IRPA5515	5.5	15.0 mm

Kopfloze Deckschraube
Mikroschraube



Art. - Nr.
TCISC
10 Ncm

ACHTUNG! Kleiner Sechskant

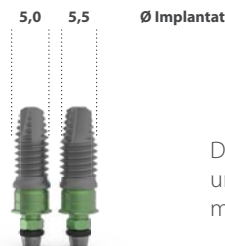

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für zementierte und verschraubte Einzelkronen sowie mehrgliedrige Versorgungen.

Gingivaformer



Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCA53	5.5	3 mm
PCA54	5.5	4 mm
PCA56	5.5	6 mm
PCA58	5.5	8 mm



PCA63	6.5	3 mm
PCA64	6.5	4 mm
PCA66	6.5	6 mm
PCA68	6.5	8 mm

20 Ncm

Abformpfosten



Pick - Up - Typ
(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIIA5	5.5	12 mm
CIIA6	6.5	12 mm



(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIRIA5	5.5	12 mm



Transfer - Typ

Art. - Nr.	Ø
CIDA	5.5

Laboranalog



Art. - Nr.
RLIA

Prov. Zylinder
Kunststoff



Art. - Nr.
CPIAP1 (mit Rotationsschutz)

Prov. Zylinder
Titan



Art. - Nr.
CPIA1 (mit Rotationsschutz)
CPIAO (ohne Rotationsschutz)

Titan - Abutment
(Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTA52	5.5	2 mm
PPTA54	5.5	4 mm
PPTA56	5.5	6 mm
PPTA62	6.5	2 mm
PPTA64	6.5	4 mm
PPTA66	6.5	6 mm
PPTA74	7.5	4 mm



Titan - Abutment 15°
(Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
PPTAA52	5.5	2 mm
PPTAA54	5.5	4 mm

UCLA - Abutment



Art. - Nr. (Gold)
PUOA1 (mit Rotationsschutz)
PUOA0 (ohne Rotationsschutz)



Art. - Nr. (Kunststoff)
PUCA1 (mit Rotationsschutz)
PUCA0 (ohne Rotationsschutz)

Ästhetik Abutment
(Ti Golden)



(mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
PATZ0	5.5	0 mm
PATZ2	5.5	2 mm
PATZ3	5.5	3 mm
PATZ4	5.5	4 mm



Art. - Nr. (Kunststoff)
CPATZ
(ausbrennbare Hülse)

Aufwachsschraube



Art. - Nr.
TEIU15 (kurz)
TEIT (lang)

Laborschraube



Art. - Nr.
TTLH
(5 Stück)
(Sechskant)

Halteschrauben



Gold
Art. - Nr.
TOOC (Vierkant)
35 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
TTUH (Sechskant)
35 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
TTUHR
(Sechskant, reduzierter
Schraubenkopf)
Zum Ausgleich von
Divergenzen von 0 bis 15°
20 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
TTUH30
Zum Ausgleich von
Divergenzen von 15 bis 30°
20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX



Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPA5075	5.0	7.5 mm
IRPA5085	5.0	8.5 mm
IRPA5010	5.0	10.0 mm
IRPA5011	5.0	11.5 mm
IRPA5013	5.0	13.0 mm
IRPA5015	5.0	15.0 mm


Art. - Nr.	Ø	Länge
IRPA5575	5.5	7.5 mm
IRPA5585	5.5	8.5 mm
IRPA5510	5.5	10.0 mm
IRPA5511	5.5	11.5 mm
IRPA5513	5.5	13.0 mm
IRPA5515	5.5	15.0 mm

Kopfloze Deckschraube
Mikroschraube



Art. - Nr.
TCISC
10 Ncm

ACHTUNG! Kleiner Sechskant

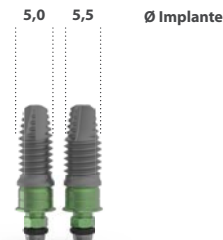

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Prothesen.

INDIREKTE RESTAURATION

MULTI-IM® Distanzhülse
(Ti Golden)



Art. - Nr.	Höhe
TMIPA15	1.5 mm
TMIPA20	2 mm
TMIPA30	3 mm
TMIPA40	4 mm

Erweiterung
MULTI-IM® Distanzhülse
(Ti Golden)



Art. - Nr.	Höhe
TMIPUEX20	2 mm
TMIPUEX30	3 mm
TMIPUEX40	4 mm

WICHTIG: diese Distanzhülse wird mit Implantaten der Ø4,1mm Standard Plattform verschraubt

Schutzkappe für
MULTI-IM® Distanzhülse



Art. - Nr.	Ø
TPMIA 10 Ncm	5.5

Abformpfosten für
MULTI-IM® Distanzhülse



Pick - Up - Typ	Art. - Nr.	Ø
CIMIPA		5.5

Registrierpfosten



Art. - Nr.	Ø
IROMIA	5.5

Laboranalog für
MULTI-IM® Distanzhülse



Art. - Nr.
RLMIA

Prov. Zylinder
für MULTI-IM® Distanzhülse



Art. - Nr. (Ti)
CPMIPA



Art.-Nr.
CPMIPAP

Steggelenke
für Provisorien auf MULTI-IM



BAPA1



BAPA2A

BAPA2B

BAP3



Zylinder für
MULTI-IM® Distanzhülse



Art. - Nr. (Gold)
COMIPA



Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIPA



Art. - Nr. (Ti f. CAD-CAM)
CZMIPA

Aufwachsschraube
für MULTI-IM® Distanzhülse



Art. - Nr.	Höhe
TEMIR (reduzierter Durchmesser)	15 mm

Halteschrauben Sechskant
MULTI-IM® Zylinder



Ti Black
Art. - Nr.
TTMIR
(Sechskant, reduzierter
Schraubenkopf)
Zum Ausgleich von
Divergenzen von 0 bis 15°
20 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
TTMI30 (Sechskant)
Zum Ausgleich von
Divergenzen von 15 bis 30°
20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX

COVER-DENTURE RESTAURATIONEN

Gingivaformer



Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCAR53	5.5	3 mm
PCAR54	5.5	4 mm
PCAR56	5.5	6 mm
PCAR58	5.5	8 mm



Art. - Nr.	Ø	Höhe
PCAR63	6.5	3 mm
PCAR64	6.5	4 mm
PCAR66	6.5	6 mm
PCAR68	6.5	8 mm

20 Ncm

Abformpfosten



Pick - Up - Typ (mit Rotationsschutz)	Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIIA5		5.5	12 mm
CIIA6		6.5	12 mm



(ohne Rotationsschutz)	Art. - Nr.	Ø	Höhe
CIRIA5		5.5	12 mm



Transfer - Typ	Art. - Nr.	Ø
CIDA		5.5

Laboranalog



Art. - Nr.
RLIA

UCLA - Abutment



Art. - Nr. (Gold)
PUOA1 (mit Rotationsschutz)
PUOA0 (ohne Rotationsschutz)



Art. - Nr. (Kunststoff)
PUCA1 (mit Rotationsschutz)
PUCA0 (ohne Rotationsschutz)

Halteschrauben



Gold
Art. - Nr.
TOOC (Vierkant)
35 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
TTUH (Sechskant)
35 Ncm



BTI Comercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

Niederlassungen

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

UK
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · Regno Unito
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

DEUTSCHLAND
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

ITALIEN
Piazzale Piola, 1
20131 Milano · Italia
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXICO
Ejército Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Messico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

VERTRIEB

CROATIA
Ortho Plan d.o.o.
Ivana Kukuljevića 20, 10000
Zagreb, Croatia
Telephone: 00385-1-58-013-02
Fax: 00385-1-58-044-02
bti@ortho-plan.com
www.ortho-plan.com

GRIECHENLAND
Abalase Ltd.
GR-16344
Itis Street 21, Atenas
Telephone: +30 210 9765002
Fax: +30 210 9765001
abalase@otenet.gr
http://www.abalase.gr

JAPAN
Satou Dental Material Co., Ltd.
1-15-3, Higashiueno Taito-Ku
JP110-0015 – Tokyo
Tel: 81-(0)3-3833-3986
Fax: 81-(0)3-3833-3989

LITAUEN
MP Dental, UAB
Ukmergės g. 300C-65,
LT06143, Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 2136648
Tel. +370 652 29991
info@mpdental.lt

RUSSLAND
Dent-A-America
Str.Clucerului 35, sect.1, Bucharest
Tel:(40)21 230 2827
Mob:(40)769 059 900
www.dent-a-america2000.ro

RUSSLAND
Advanced Surgical Technology
127282, Moskow, Russia
Tchermianskii proezd 5, bld.1
Tel. +7 499-640-83-64
s.krikorian@surgitech.ru

UKRAINE
Ooo "Bio-Tech Medical"
79010, Lviv, Chernihivska street, 18
Tel. +380 (73) 031 31 31
info@biotechmedical.com.ua

www.bti-biotechnologyinstitute.de

Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebs Händler nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Filialen.

Diese Legende zeigt Symbole und Farbcodierungen, die in diesem Katalog verwendet werden:



Kompatibel mit Expansions-Implantaten



Kompatibel mit TINY® Implantaten



Kompatibel mit Externa Universal Plattform



Kompatibel mit Externa Plus Implantaten



Kompatibel mit Externa Ø 5,5mm Plattform



BTI APP
NEUE PRODUKTE

iPhone / smartphone -Version

iPad / Tablets -Version (**Kundenzugang Privat**)