

Opalescence



Tooth Whitening

go<sup>®</sup>

MY SMILE IS

*Charming*

#MYSMILEISPOWERFUL

*Ecem*, aus Deutschland – Marketingspezialistin und Hobbyköchin – lächelt, wenn sie sich auf den Weg in ein neues Abenteuer begibt. Am liebsten dorthin, wo sie vorher noch nie war. Mit den vorgefüllten Opalescence Go<sup>®</sup>-Schiene für zu Hause mit 6% Wasserstoffperoxid kann sie ihre Zähne dann aufhellen, wann es ihr am besten passt. Praktisch und gebrauchsfertig direkt aus der Packung. Ein strahlendes Lächeln hilft ihr, auf ihren Reisen neue Freunde zu finden. That's the power of a smile. Erfahren Sie mehr über kosmetische Zahnaufhellung auf [opalescence.com/de](http://opalescence.com/de).





## Opalescence Go für die kosmetische Zahnaufhellung:

- Professionelle und leistungsstarke Zahnaufhellung für Zuhause mit 6 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Praktisch und gebrauchsfertig durch vorgefüllte UltraFit™ Trays
- Das UltraFit™ Tray sitzt höchst komfortabel, passt sich dem individuellen Lächeln des Patienten an und ermöglicht damit eine entspannte Zahnaufhellung
- Reicht von Molar zu Molar, damit kommt das Gel auch mit den Seitenzähnen in Kontakt
- Opalescence Go Zahnaufhellungsgel enthält Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Anwendungsdauer: 5-10 Tage lang täglich für 60-90 Minuten
- Erhältlich in den angenehmen Geschmacksrichtungen Mint und Melone



## Anwendung



1. Aus der Packung nehmen.



2. Schiene auf Zahnbogen ausrichten.



3. Leicht ansaugen oder schlucken.



4. Äußere Schiene entfernen.



5. Erneut ansaugen oder schlucken.



6. Tragezeit 6%: 60 bis 90 Minuten.

4634 Opalescence Go Mint 6 % Patient Kit  
3592 Opalescence Go Melone 6 % Patient Kit

*Jedes Kit enthält 10 Blisterpackungen  
mit je 1 Tray für OK und UK*

4639 Opalescence Go Mint 6 % Patient Kit 6 St.  
3593 Opalescence Go Melone 6 % Patient Kit 6 St.

*Jedes Kit enthält 6 Patient Kits*

4644 Opalescence Go Mint 6 % Mini Kit  
3599 Opalescence Go Melone 6 % Mini Kit

*Jedes Kit enthält 4 Blisterpackungen  
mit je 1 Tray für OK und UK*

4649 Opalescence Go Mint 6 % Mini Kit 12 St.  
3600 Opalescence Go Melone 6 % Mini Kit 12 St.

*Jedes Kit enthält 12 Mini Kits*

Im Kühlschrank aufbewahren.



1. realityesthetics.com

© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

UPP 298-DE 04-2019

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Improving Oral Health Globally